

# MegaBee™

Elektronisk håndholdt kommunikasjonstavle

# Manual

# Introduksjon

MegaBee kommunikasjonstavle er utformet for å gi en enkel og rask kommunikasjon mellom en bruker som ikke er i stand til å snakke tydelig eller meddele seg skriftlig ("taleren") og en omsorgsperson, venn eller sykepleier ("lytteren").

Bokstavene defineres av taleren ved øyepeking, og lytteren taster inn bokstavene som blir til ord som vises på en liten skjerm.

Denne manualen er delt i to avsnitt: Basis og Avanserte funksjoner. Du trenger bare å kunne basisfunksjonene for å få til en rask kommunikasjon. De avanserte funksjonene gjør at du kan se gjennom taksten, justere skjermen og koble MegaBee med datamaskiner.

## Bruk av MegaBee


Lytteren holder MegaBee med begge hender og med de fargede knappene mot seg. Hun/han ser på taleren gjennom åpningen i midten av enheten. På denne måten kan en lett følge øyebevegelsene til taleren. Lytteren bør ha tommelfingrene på begge hender komfortabelt posisjonert over knappene.

Slå på enheten med den sorte ovale knappen på venstre side. Alle lysene vil blinke en gang og teksten "MegaBee" vises på displayet. Denne forsvinner etter to sekunder.

PÅ knappen

Display



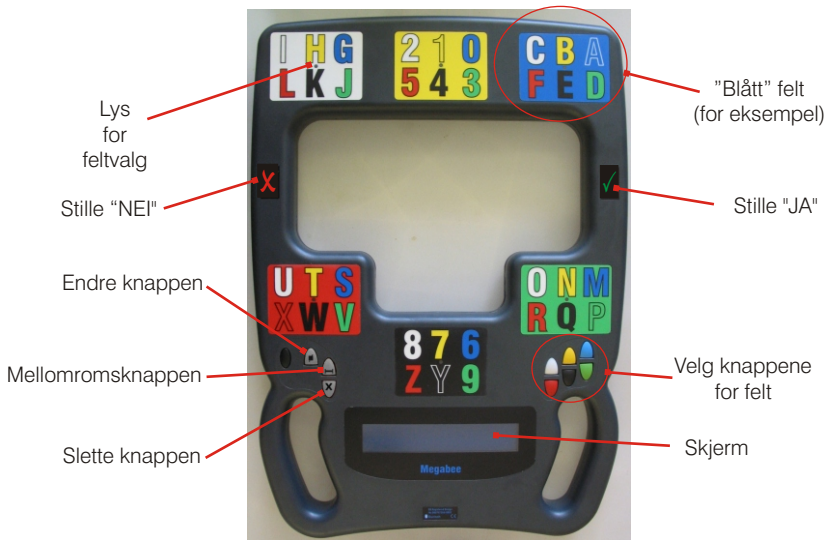

For å velge en bokstav kreves en sekvensiell samhandling mellom lytter og taler når de ser på hverandre gjennom tavla. Prosessen kan oppsummeres slik:

- 1) taleren: Ser på bokstaven eller tallet og blunker
- 2) lytteren: Bekrefter valget ved å si fargen på feltet
- 3) lytteren: Trykker den tilsvarende "felt" knappen (som lyser)
- 4) taleren: Ser nå på feltet som har samme farge som bokstaven du ønsker
- 5) lytteren: Trykker på den tilsvarende "felt" knappen
- 6) Bokstaven vises på skjermen

Steg 2 kan utelates når kommunikasjonen er blitt mer innarbeidet. Et alternativ til blunkingen kan være at taleren ser OPP eller på JA symbolet hvis vedkommende finner blunkingen vanskelig.

# Et eksempel

Hvis ordet "bad" skal staves vil prosessen bli:

## Taleren

Ser på bokstaven "B" og blunker.

"B" er gul, så se på det gule feltet og blunk.

"B" vises i displayet.

---

Se på bokstaven "A" og blunk.

"A" er blå, så se på det blå feltet og blunk.

"A" vises i displayet.

---

Se på bokstaven "D" og blunk.

"D" er grønn, så se på det grønne feltet og blunk.

"D" vises i displayet.

## Lytteren

("B" er den gule bokstaven i den blå boksen)  
Si "blå" og trykk på den blå knappen.  
Lyset for den blå boksen vises.

Trykk på den gule knappen.

("A" er den blå bokstaven i den blå boksen)  
Si "blå" og trykk på den blå knappen.  
Lyset for den blå boksen vises.

Trykk den blå knappen.

---

("D" er den grønne bokstaven i den blå boksen)  
Si "blå" og trykk på den blå knappen.  
Lyset for den blå boksen vises.

Trykk på den grønne knappen.

Ordet "BAD" vises nå i displayet på begge sider.

## Forkortelser/Short Cuts

Når en er blitt mer erfaren med å velge bokstaver og tall kan en benytte en forkortelsesfunksjon for å få mer fart på kommunikasjonen. Forkortelsene er lagret som en bokstav etterfulgt av et tall. Et sett med standardforkortelser følger med MegaBee, men du kan lett tilpasse disse til egne behov (se Avanserte funksjoner).


Eksempler på forkortelser kan være:

D7 = DRIKK

C5 = KAN DU GI MEG

# Feil, Mellomrom og Slett

Det trengs tre tilleggsmetoder for å kommunisere på andre måter enn med bokstaver.

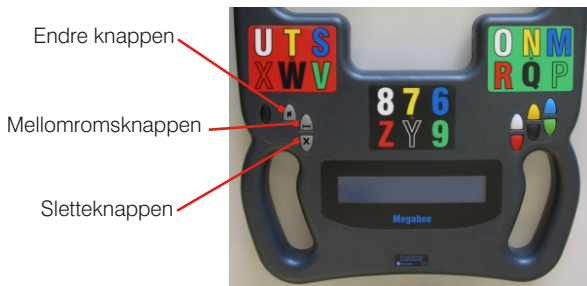

## Endre

Hvis lytteren velger feil startfelt kan taleren se direkte på feltene og blunke to ganger. Det betyr at det valgte feltet er feil og lytteren må trykke på "Endre" knappen for å gå tilbake til den opprinnelige valgmåten.

## Mellomrom

For å sette inn et mellomrom ser taleren direkte på lytteren og blunker en gang. Lytteren trykker på Mellomromsknappen og et mellomrom blir satt inn i teksten.

## Slette bokstaver(eller Forkortelser)

For å slette et tegn eller en forkortelse, ser taleren direkte på lytteren og lukker øynene for en lengre periode (ca. et halvt sekund). Lytteren trykker på "Slette" knappen og den siste bokstaven eller forkortelsen fjernes fra skjermen.

## Slette hele samtalen

For å fjerne en hel melding fra skjermen (og minnet) slås MegaBee av og startes igjen.

## Svakt batteri - Advarsel og lading

Du bør lade MegaBee hver natt ved å bruke batteriladeren som følger med. (Ikke bruk en annen lader).

Sett pluggen i stikkontakten og koble laderen til MegaBee med den lille runde pluggen. Et blinkende grønt lys i det "røde" feltet indikerer at den lader. Når det grønne lyset slutter å blinke er MegaBee fulladet.



Det kommer en advarsel på skjermen når batteriet er lavt. (Markøren blir til en hvit boks). MegaBee kan brukes mens den lades uten problemer.

## Strømsparing

For å spare strøm slår MegaBee automatisk av visse funksjoner hvis de ikke er blitt brukt på en stund.


Etter 30 sekunder uten aktivitet slås bakgrunnslyset av. Skjermen dimmes, men teksten blir stående. Bakgrunnslyset slår seg automatisk på igjen når en trykker på en av knappene.

Etter en periode uten aktivitet slås hele enheten av. Du kan selv bestemme hvor lenge timeout tiden skal vare se Avanserte funksjoner. Trykk PÅ for å starte igjen.

## Andre funksjoner og data grensesnitt (interfacing)

Det er også andre funksjoner tilgjengelig for lytteren, som kan hjelpe og utvide bruken av MegaBee. En kommer til disse funksjonene ved å trykke på den sorte "Funksjons" knappen, som ved trykk viser et antall valgmuligheter i displayet. Følg stegene under for å gå inn i og endre valgene:

- i) Trykk Funksjon (sort) for å gå inn i Funksjonsmenyen.
  - ii) Trykk Opp, Ned for å bla deg gjennom valgene.
  - iii) Trykk Enter for å velge.
- Deretter:
- iv) Trykk Opp, Ned for å bla deg gjennom innstillingene.
  - v) Trykk Enter for å velge innstilling.

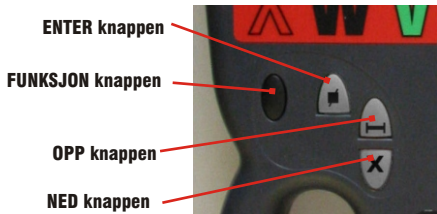

*For alle funksjoner som gjelder data grensesnittet, vennligst se Hjelpelifilen på CD-en som følger med MegaBee.*

## Kontrast

Endrer LCD displayets kontrast.

## Bakgrunnslys

Skrur bakgrunnslyset av og på. Det er lurt å skru av bakgrunnslyset på dagtid eller på opplyste steder.

## Bluetooth

Bluetooth gjør at MegaBee kan kommunisere med datamaskinen. Hvis du ikke bruker Bluetooth fasiliteter vil du spare batteriet ved å slå den av. (Se PC hjelpelifilen på CD-en)

## Rullemodus

Denne gjør at alt som er skrevet i løpet av en økt kan leses ved å rulle gjennom skjermbildene. Du kan ikke legge til bokstaver i rullemodus.

## Nedlasting

Denne gjør at du kan sende teksten til en PC. Bluetooth må være aktiv for at kontrollen skal fungere, og PC-en må ha Bluetooth linken på (Se PC hjelpefilen på CD-en).

## Modus

Her velges tekst eller bildemodus. (Se "Bruk bilder" filen på CD-en).

## Vokabular

Når denne er aktiv kan et brukerdefinert ordforråd lastes inn i MegaBees minne. (Se PC hjelpefilen på CD-en).

## Timeout tid

Dette er den tiden MegaBee kan være inaktiv før den slås av. Ved hyppig kommunikasjon er 1 eller 2 minutter greit fordi det sparer batteriets levetid. Ved datakommunikasjon er 5 minutter passe. Maks timeout er 15 minutter.

## Slå av

Dette valget slår MegaBee AV.

*All dokumentasjon og programvare kan lastes ned fra*  
[www.megabee.net](http://www.megabee.net)



MegaBee er et Registered Trademark of  
E2L Limited.

Spesifikasjonene kan endres.  
©E2L Products Limited 2008-2010

**Made in EU**

EU Registered Design  
No 00074766-0001

