

MegaBee™

elektronik taşınabilir iletişim tableti

Kılavuz

Kullanım talimatları

MegaBee iletişim tableti; konuşma ve yazma güçlüğü çeken bir kullanıcı ('konuşmacı') ile bir bakıcı, arkadaş veya hemşire ('dinleyici') arasında kolay ve hızlı bir iletişim sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.

Konuşmacı, göz hareketi ile karakterleri tanımlar. Dinleyici, karakterleri girer ve küçük bir ekranda görüntülenen kelimeleri oluşturur.

Bu kılavuz; Temel ve İleri Düzey Fonksiyonlar olarak iki bölümden oluşur. Temel kullanım bölümü, hızlı iletişim kurmak için bilmeniz gereken her şeyi içerir. İleri düzey fonksiyonları; metni değerlendirmenizi, ekranı ayarlamanızı ve MegaBee'nin bilgisayarlar ile arabirim bağlantısını yapmanızı sağlar.

MegaBee'nin kullanımı


Dinleyici; renkli düğmelere bakacak ve ünitenin ortasındaki boşluktan konuşmacıyı görecek şekilde MegaBee'yi iki eliyle tutar. Bu şekilde, konuşmacının göz hareketi kolayca takip edilebilir. Dinleyici, her iki elinin başparmağını rahatça düğmelerin üzerinde tutabilmelidir.

Sol taraftaki siyah oval düğmeyi kullanarak üniteyi çalıştırın. Tüm ışıklar bir kere yanıp sönecektir ve ekranda 'MegaBee' şeklinde bir mesaj görünecektir. İki saniye sonra bu yazı yok olacaktır.

**ON/OFF
düğmesi**

Ekran



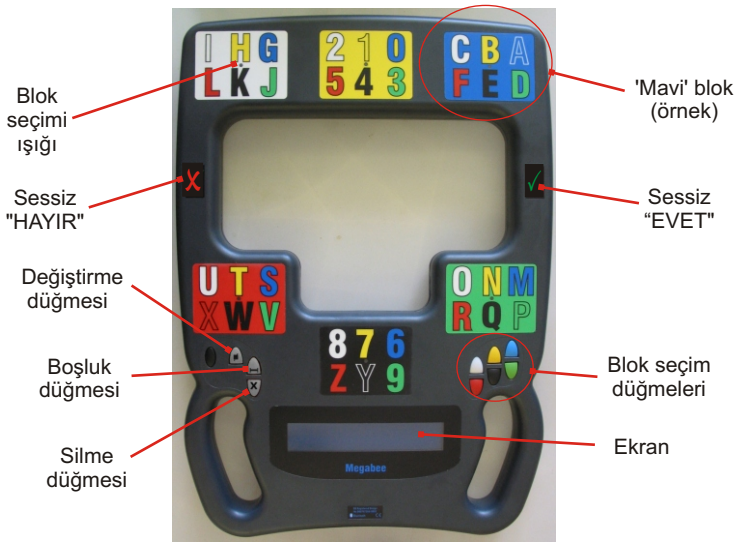

Bir karakteri seçmek, okuyucu ile yazıcı arasında cihazdan birbirlerine bakarak karşılıklı bir etkileşim gerektirir. Bu işlem aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- 1) Konuşmacı: Harfe veya sayıya bakar ve göz kırpar.
- 2) Dinleyici: Blok rengini söyleyerek seçimi onaylar.
- 3) Dinleyici: Karşılık gelen 'blok' düğmesine basar (ışık yanacaktır).
- 4) Konuşmacı: Seçilen harfin rengindeki bloğa bakar.
- 5) Dinleyici: Karşılık gelen 'blok' düğmesine basar.
- 6) Karakter ekranda görünür.

Dinleyici ve konuşmacı bu cihazla iletişime alıştıklarında, 2. Adım atlanabilir. Konuşmacıya göz kırpmak zor gelirse, 'EVET' sembolüne bakma veya yukarı bakma gibi alternatif bir onay yöntemi de kullanılabilir.

Örnek:

'bad' kelimesi hecelenecek olsun. İşlem aşağıdaki gibi yapılacaktır:

KONUŞMACI

DİNLEYİCİ

'b' harfine bakar ve göz kırpar.

('b' mavi blokta sarı renkli harftir)
'mavi' olduğunu söyler ve mavi düğmeye basar.
Mavi blok seçim ışığı yanar.

'b' sarı renklidir, dolayısıyla şimdi sarı bloğa bakar ve göz kırpar.

Sarı düğmeye basar.

'b' harfi ekranda görünür.

'a' harfine bakar ve göz kırpar.

('a' mavi blokta mavi renkli harftir)
'mavi' olduğunu söyler ve mavi düğmeye basar.
Mavi blok seçim ışığı yanar.

'a' mavi renklidir, tekrar mavi bloğa bakar ve göz kırpar.

Mavi düğmeye basar.

'a' harfi ekranda görünür.

'd' harfine bakar ve göz kırpar.

('d' mavi blokta yeşil renkli harftir)
'mavi' olduğunu söyler ve mavi düğmeye basar.
Mavi blok seçim ışığı yanar.

'd' yeşil renklidir, dolayısıyla şimdi yeşil bloğa bakar ve göz kırpar.

Yeşil düğmeye basar.

'd' harfi ekranda görünür.

Çift taraflı ekranda artık 'BAD' kelimesi görüntülenir.

Kısaltmalar / Kısayollar

İletişimi daha hızlı kılmak için, harfleri ve sayıları seçmeye alıştığınızda kolayca kullanabileceğiniz bir kısaltma özelliği de bulunmaktadır. Kısaltmalar; bir harf ve harfin sonuna eklenen bir sayı olarak kaydedilirler. Varsayılan fabrika ayarı kısaltmaların bir listesi MegaBee'nizde bulunmaktadır ve kendi isteğinize göre kolayca onları ayarlayabilirsiniz (İleri Düzey Fonksiyonlara bakınız).

Kısaltmalar ile ilgili örnek aşağıda yer almaktadır:

D7 = İÇECEK

C5 = GETİRİR MİSİN?

Hatalar, Boşluklar ve Silme

Karakter girişinden farklı diğer işlemler için üç farklı iletişim yöntemi gerekir.

Değiştirme
düğmesi

Boşluk
düğmesi

Silme
düğmesi



Değiştirme

Dinleyici ilk bloğu yanlış seçerse, konuşmacı doğrudan onlara bakar ve iki defa göz kırpar. Bu durum, seçilen bloğun yanlış olduğunu gösterir. Dinleyici, 'Değiştirme' düğmesine basarak ilk blok seçim moduna dönmelidir.

Boşluklar

Bir boşluk koymak için, konuşmacı doğrudan dinleyiciye bakar ve bir kere göz kırpar. Dinleyici, 'Boşluk' düğmesine basar ve yazıya bir boşluk konulur.

Karakteri silme (veya Kısaltma)

Bir karakteri veya kısaltmayı silmek için, konuşmacı doğrudan dinleyiciye bakar ve daha uzun bir süre (yarım saniye) gözlerini kapatır. Dinleyici, 'Silme' düğmesine basar ve ekrandan son karakteri veya kısaltmayı siler.

Tüm konuşmayı silme

Ekrandan (ve hafızadan) tüm mesajı silmek için, sadece MegaBee'yi kapatın ve tekrar açın.

Pili az uyarısı ve şarj

Tedarik edilen şarj cihazını kullanarak MegaBee'yi her gece şarj edin (Başka bir şarj cihazı kullanmayınız).

Pili şarj etmek için, güç beslemesini elektrik prizine takın ve MegaBee'yi küçük daire şeklindeki fişi kullanarak bağlayın. 'kırmızı' blokta yanıp sönen yeşil ışık, onun şarj olduğunu gösterir. Sürekli yeşil ışık yandığında, MegaBee tamamen şarj olmuştur.



Pili az olarak çaişirsa, bir uyarı mesajı ortaya çıkar (imleç beyaz bir kare blok haline gelir). MegaBee, şarj edilirken de sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Güç Tasarrufu özellikleri

MegaBee, güç tasarrufu amacıyla kullanılmayacak bazı özellikleri otomatik olarak kapatır.

30 saniye aktif olmadığında, arka ışık söner. Bu durumda, ekran kararır ancak yazılarda hiçbir kayıp olmaz. Başka bir düğmeye basıldığında, arka ışık otomatik olarak yanar.

Belli bir süre aktif olmadığında, tüm ünite kapanır (size uygun zaman aşımı süresini kendiniz belirleyebilirsiniz – İleri Düzey Fonksiyonları 'na bakınız). Yeniden kullanmak için, onu açmanız yeterlidir.

Diğer fonksiyonları ve bilgisayar arabirim bağlantısı

MegaBee'nin kullanımına yardım edebilecek ve kullanımını genişletebilecek dinleyici için başka fonksiyonlar da bulunur. Ekranda birtakım seçenekler sunan siyah 'Fonksiyon' düğmesiyle tüm bu fonksiyonlara ulaşılabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bir seçeneğe ulaşabilir ve onu değiştirebilirsiniz:


- i) Fonksiyon düğmesine (siyah düğmeye) basarak fonksiyon menüsüne girin.
- ii) Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak seçeneklere bakın.
- iii) Giriş düğmesine basarak bir seçeneği seçin.

Ardından:

- iv) Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak ayarlara bakın.
- v) Giriş düğmesine basarak bir ayarı seçin.

Fonksiyon düğmesine (siyah düğmeye) basarak normal iletişime geri dönün.

Bilgisayar arabirim bağlantısını kapsayan tüm fonksiyonlar için, MegaBee ile gelen CD'deki Help dosyasına bakınız.

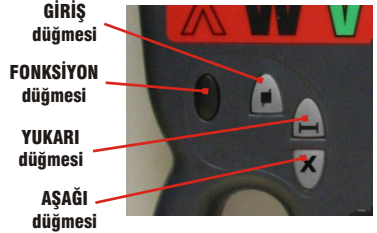

Contrast (Kontrast)

LCD ekran kontrastını değiştirir.

Backlight (Arka ışık)

Arka ışığı yakar veya söndürür. Gündüzleri veya çok aydınlık yerlerde arka ışık söndürülmelidir.

Bluetooth

Bluetooth, MegaBee'nin bir bilgisayar ile iletişim kurmasını sağlar. Bluetooth araçlarını kullanmak istemezseniz, ayarı 'off' (kapalı) yaparak pil ömrünü zatabilirsiniz (CD'deki 'PChelp' dosyasına bakınız).

Scroll Mode (Kaydırma Modu)

Ekranları kaydırarak inceleme süresi boyunca tüm yazma işlemlerine izin verir. Scroll mode (kaydırma modu)'ta karakter ekleyemezsiniz.

Download (Bilgisayara İndirme)

Yazıları bilgisayarınıza göndermeyi sağlar. Bu kontrolün çalışması için Bluetooth'un aktif olması gerekir ve bilgisayarın Bluetooth bağlantısının yapılmış olması gerekir (CD'deki 'PChelp' dosyasına bakınız).

Mode (Mod)

Yazı veya resim modunu seçmek için kullanılır (CD'deki 'UsingPictures' dosyasına bakınız).

Vocabulary (Sözcükler)

Aktif olduğunda, kullanıcı tarafından tanımlanan bir kelimenin MegaBee'nin hafızasına yüklenmesini sağlar. (CD'deki 'PChelp' dosyasına bakınız).

Timeout (Zaman Aşımı)

MegaBee kapanmadan önce, kullanılmadan aktif kalabileceği süredir. Sık iletişim için, 1 veya 2 dakikalık süre pil ömrünü uzatacaktır. Bilgisayar iletişimi için ise, 5 dakikalık süre uygundur. Maksimum zaman aşımı süresi 15 dakikadır.

Power Down (Kapatma)

Bu seçeneği seçerseniz, MegaBee kapanır.

Tüm dokümanları ve yazılımı, www.megabee.net web sitesinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



MegaBee, E2L Limited'in Tescilli Markasıdır.

Özellikler değiştirilebilir.

©E2L Products Limited 2008-2013

AB malıdır

EU Registered Design
No 00074766-0001

